

# Uždaros atsiurbimo sistemos TrachSeal™ naudojimas

## TrachSeal uždaros atsiurbimo sistemos

### Nustatymas

Pasirinkite iš lentelės tinkamą TrachSeal ET/tracheostominiam vamzdeliui



Nuimkite atjungimo pleištą nuo fiksuoto dangtelio.



Pritvirtinkite TrachSeal tarp ET/ tracheostominio vamzdelio ir kvėpavimo sistemos naudojant 22M/15F jungtį paciento pusėje. Esanti papildoma armonikos tipo jungtelė nėra privaloma. Naudojant 72 val. TrachSeal, įsitikinkite, kad izoliacinis vožtuvas yra uždarytoje padėtyje.



Prikljuokite daugiakalbį dienos lipduką esantį pakuotėje, kad nustatytumėte, kada uždara atsiurbimo sistema turi būti pakeista.

#### ET vamzdelio dydis TrachSeal

ET vamzdelio dydis	TrachSeal
● 5.0	F10
● 5.5	F10
○ 6.0	F12
○ 6.5	F12
● 7.0	F14
● 7.5	F14
● 8.0 ir didesni	F16

### 24 valandų TrachSeal

Kodas	Aprašymas	Dydis
● 3240002	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F16
● 3240001	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F14
○ 3240000	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F12
● 3240003	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F10
● 3240007	Suaugusiųjų tracheostominio	F16
● 3240006	Suaugusiųjų tracheostominio	F14
○ 3240005	Suaugusiųjų tracheostominio	F12
● 3240004	Suaugusiųjų tracheostominio	F10

### 24 valandų TrachSeal su fiziologinio tirpalo ampulėmis

Kodas	Aprašymas	Dydis
● 3241002	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F16
● 3241001	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F14
○ 3241000	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F12
● 3241003	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F10
● 3241007	Suaugusiųjų tracheostominio	F16
● 3241006	Suaugusiųjų tracheostominio	F14
○ 3241005	Suaugusiųjų tracheostominio	F12
● 3241004	Suaugusiųjų tracheostominio	F10

### Siurbimo procedūra

1. Pritvirtinkite siurbimo vamzdelį prie TrachSeal siurbimo jungties.
2. Siurbimo neigiamas slėgis turi neviršyti 150 mmHg.
3. Prieš atsiurbimą iš anksto prisotinkite pacientą deguonimi pagal lignoninės skyriaus politiką.



Naudojant 72 valandų TrachSeal gaminį, atidarykite izoliacinį vožtuvą sulygiuodami dvi rodykles.



Švelniai pastumkite kateterį pirmyn, kol ant ET vamzdelio esantys skaičiai ir ant kateterio esantys skaičiai sutaps. Tada pastumkite dar du centimetrus.



Nuspauskite atsiurbimo vožtuvą ir lėtai tiesiu judesiu traukite kateterį atgal. Siurbimas neturėtų trukti ilgiau kaip 15 sekundžių.



Traukite kateterį tol, kol pamatysite juodą žymeklį distalinėje pusėje ir pajusite spragtelėjimą.



Po siurbimo, 72 val. gaminyje, užrakinkite izoliacinį vožtuvą.

Aukščiau pateikti duomenys pagrįsti paskelbtais AARC klinikiniais duomenimis praktikos gairėmis: Endotrachėjinis siurbimas mechanškai ventiliuojamų pacientų su dirbtine plaučių ventilacija 2010 m.

### 72 valandų TrachSeal

Kodas	Aprašymas	Dydis
● 3720002	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F16
● 3720001	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F14
○ 3720000	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F12
● 3720003	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F10
● 3720007	Suaugusiųjų tracheostominio	F16
● 3720006	Suaugusiųjų tracheostominio	F14
○ 3720005	Suaugusiųjų tracheostominio	F12
● 3720004	Suaugusiųjų tracheostominio	F10

### 72 valandų TrachSeal su fiziologinio tirpalo ampulėmis

Kodas	Aprašymas	Dydis
● 3721002	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F16
● 3721001	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F14
○ 3721000	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F12
● 3721003	Suaugusiųjų endotrachėjinio	F10
● 3721007	Suaugusiųjų tracheostominio	F16
● 3721006	Suaugusiųjų tracheostominio	F14
○ 3721005	Suaugusiųjų tracheostominio	F12
● 3721004	Suaugusiųjų tracheostominio	F10

### Plovimo procedūra



Atidarykite skalavimo angos dangtelį ir pritvirtinkite fiziologinio tirpalo buteliuką arba švirkštą. Paspauskite siurbimo vožtuvą. Skalaukite, kol kateterio antgalis bus švarus. Kai baigsite uždarykite skalavimo angos dangtelį.



Procedūros pabaigoje svarbu užrakinti siurbimo vožtuvą. Tai užtikrina, kad vožtuvas netyčia nenusispaustų ir nepakenktų ventilacijai.

### Pašalinimas



Naudokite pridėtą atjungimo pleištą TrachSeal nuėmimui nuo ET vamzdelio. Įstatykite jį tarp ET vamzdelio ir TrachSeal ir stumkite į viršų prieš savo nykštį. Panaudotą TrachSeal išmeskite pagal lignoninės tvarką.

Visos procedūros metu stebėkite pacientą ir laikykitės skelbiamų atsiurbimo rekomendacijų.

Vaizdo įrašą galima rasti [www.intersurgical.com/products/critical-care/trachseal-closed-suction-systems](http://www.intersurgical.com/products/critical-care/trachseal-closed-suction-systems)

Šios instrukcijos nėra išsamus TrachSeal™ uždaros atsiurbimo sistemos paruošimo ir naudojimo vadovas. Prieš bandydami naudoti TrachSeal™ uždara atsiurbimo sistemą, naudotojas pirmiausia turėtų susipažinti su visa naudojimo instrukcija (IFU).



Arnionių g. 60 Pabradė LT-18170 Lietuva  
support@intersurgicalinc.lt  
www.intersurgical.lt